

Desinfektionsmittelkonzentrat

BIGUANID FLÄCHE N

Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung

- Reinigungsstark
- Keine Geruchsbelästigung
- Ideal für Linoleum und PVC



Produktbeschreibung

BIGUANID FLÄCHE N ist ein Desinfektionsmittelkonzentrat für die Desinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten, medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art und ist hervorragend geeignet zur Flächendesinfektion von abwaschbaren nicht porösen Flächen.

BIGUANID FLÄCHE N bietet ein breites Wirkungsspektrum auf der Basis von quaternären Ammoniumverbindungen und enthält weder Aldehyde noch Phenole.

BIGUANID FLÄCHE N enthält einen Korrosionsschutz und bietet eine gute Materialverträglichkeit. Es ist besonders zu empfehlen für Bereiche, in denen neben der Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen eine Geruchsbelästigung vermieden werden soll.

Anwendungsgebiete

Gem. Biозidprodukte-Verordnung (BPR): Zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art, auch in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung und Großküchen.

Gem. EU-Medizinprodukteverordnung: Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von nichtinvasiven Medizinprodukten wie Atemmasken sowie Inkubatoren.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			5 min	15 min	30 min	60 min	240 min
Bakterien und Pilze							
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion (4-Felder-Test, bakterizid, levurozid)*	VAH/ EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung	1 %	0,75 %	0,5 %	0,5 %	0,25 %
Behüllte Viren							
begrenzt viruzid	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV		0,5 %			
Unbehüllte Viren							
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige Belastung				1 %	
wirksam gegen Adenoviren	EN 14476	niedrige Belastung					2 %
wirksam gegen SV40/Papovaviren	RKI/DVV					1 %	0,5 %
wirksam gegen Rotaviren	RKI/DVV	ohne Belastung		0,25 %			
Ergänzende Prüfergebnisse							
tuberkulozid (M.terrae)	DGHM	hohe Belastung				0,5 %	

* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

Anwendung

Flächenwischdesinfektion:

Die zu desinfizierende Fläche mit einer ausreichenden Menge der frisch angesetzten BIGUANID FLÄCHE N Gebrauchslösung vollständig benetzen, diese mechanisch verteilen und abtrocknen lassen (Scheuer-Wisch-Desinfektion). In der Routineanwendung können die desinfizierten Flächen unmittelbar nach der Abtrocknung wieder genutzt werden.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

Vor erstmaliger Anwendung von BIGUANID FLÄCHE N ist eine Grundreinigung der



BIGUANID FLÄCHE N

Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung

Flächen mit einem geeigneten Produkt, zum Beispiel HANSA CLEAN SPEZIAL zu empfehlen.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:

16 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid.

Enthält: 15 - 30 % nichtionische Tenside, amphotere Tenside 5 - 15 %, Desinfektionsmittel, Duftstoffe.

Materialverträglichkeit

Die Anwendung von **BIGUANID FLÄCHE N** wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Kupfer, Messing, Polyethylene terephthalate (PET), Polycarbonate (PC), Acrylonitrile-Butadien-Styrene (ABS). Die Anwendung von **BIGUANID FLÄCHE N** ist bei folgenden Materialien nur bedingt zu empfehlen: Synthetisches Leder.

Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT

DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Art. Nr.	PZN
BIGUANID FLÄCHE N	Sachet	40 ml	200	00-201-0004-01	16243288
	Dosierflasche	1 L	10	00-201-010	01834405
	Griffflasche	2 L	6	00-201-020-01	16202220
	Kanister	5 L	3	00-201-050	01899528
	Kanister	10 L	1	00-201-100	01899557
	Kanister	25 L	1	00-201-250	-
Dosierhilfen	Dosierflasche 1L	Dosierung: 25 - 60 ml	1	00-904-010	-
	Kanisterdosierpumpe	2 L/5 L/10 L	1	00-906-000-01	-
	Kanisterumfüllhahn	2 L/5 L/10 L	1	00-907-000	-
Zubehör	Kanisterschlüssel	-	1	00-909-050	-

CE 0482



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGVS und bei der DGKH. www.schumacher-online.com

